

## Meliseptol® rapid – alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, umfassend wirksam

### Eigenschaften

- gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- frischer Geruch
- für Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Behandlungstühlen, Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen
- umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid und fungizid (inkl. Schimmelpilze). Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) und viruzid (inkl. Noroviren).
- Einwirkzeit nur 1 Minute (gemäß DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- Einwirkzeit Viruzidie: 10 Minuten
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste aufgeführt

viruzid



### Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Meliseptol® rapid aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® rapid prüfen.

Lieferform	REF	PZN
250 ml-Sprühflasche	18564	01264592
250 ml-Dosierflasche	18566	01264534
1000 ml-Handsprühflasche*	18565	01264586
1000 ml-Flasche	19108	00241413
5 Liter-Kanister	18567	01264600
Sprühkopf für 1000 ml-Flasche	6510094	02182034
Auslaufhahn 5 Liter-Kanister	3908216	03393968

\* Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen

#### Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit  
Geruch: alkoholartig  
pH-Wert: ca. 7,0  
Flammpunkt: +31 °C  
Dichte: 0,91 g/ml bei 20 °C

Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH bakterizid/levurozid	1 Min.*
tuberkulozid	30 Sek.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1 Min.
viruzid	10 Min.
Rotaviren	1 Min.
Polyomaviren	5 Min.
Adenoviren	1 Min.
Polioviren	10 Min.
Noroviren**	2 Min.

\* Der kürzestmögliche Leistungswert beim VAH beträgt 5 Min.

\*\* Surrogatvirus FCV

#### Meliseptol® rapid – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 50,0 g, Didecylidimethylammoniumchlorid 0,075 g sowie Duft- und Hilfsstoffe. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht ionische Tenside, Parfum. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Gefahr ernster Augenschäden (nach Augenkontakt sorgfältig mit viel Wasser ausspülen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 31 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m².