


Produktinformation: 20512

Wischdesinfektion

- ➔ anwendungsfertige Schnelldesinfektion, alkoholfrei
- ➔ mit bester Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung
- ➔ auch als Schaum einsetzbar
- ➔ aldehydfrei
- ➔ extrem schnelle bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit
- ➔ wirksam gegen Grippe, Noro und MRSA
- ➔ VAH- gelistet
- ➔ hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"

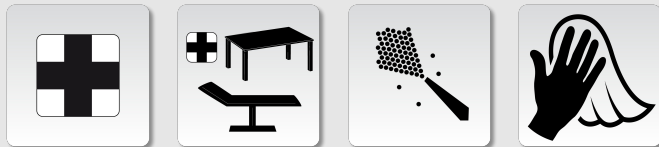

RHEOSEPT-WD plus

Schnellwirkende alkoholfreie und anwendungsfertige Wischdesinfektion

Produktbeschreibung

Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel mit guter Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung zur Wischdesinfektion und Flächenreinigung von wasserfesten Oberflächen (auch Acrylglasflächen) im medizinischen Bereich. In anwendungsfertiger Konzentration (ready-to-use). Wirksam bereits nach einer 1 Minute. Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterizid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia, BVDV). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Anwendungsbereiche

Schnelldesinfektion im Wischverfahren für alle wasserfesten Oberflächen von Medizinprodukten, wie Geräteoberflächen,

Sitze, Liegen, Wannen, aber auch Sonnenbänke. Geeignet für Materialien wie Kunststoffe, Lacke, Keramik, Acrylglas, etc. Spezielle Eignungsgutachten für Plexiglas und Inneneinrichtungen von Rettungswagen liegen vor.

Anwendungshinweise

Bei der Reinigung und Wischdesinfektion Produkt unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche auftragen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Einwirkzeiten je nach Einsatzbereich beachten. Bei der Verwendung der RHEOFIX-wischBox WD-gelb maximale Standzeit von 4 Wochen beachten. Bei sichtbaren Vorverschmutzungen ist die Oberfläche zunächst mit der RHEOSEPT-WD plus vorzureinigen. Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder

nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Das Produkt kann auch als Schaum mit dem RHEOSOL-Schäumer Maxi oder einer Pumpschaumflasche verwendet werden. Nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen.

Wirkungsspektrum

Wirksamkeit: bakterizid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia, BVDV).

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid EN 1276, EN 13697, EN 1650
Einwirkzeit 5 Minuten	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid (VAH) niedrige Belastung/Mechanik
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe) EN 14476
Einwirkzeit 30 Minuten	unverdünnt	Norovirus (MNV) EN 14476
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Rotavirus
5 Minuten	unverdünnt	Polyomavirus SV40

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten: 0,25g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 0,25g Benzalkoniumchlorid, 0,25g Alkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Limonene.

Physikalisch-chemische Daten

- ➔ pH-Wert (Konzentrat) 7
- ➔ pH-Wert (Anwendung) ca. 7

Besondere Hinweise

Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit flüssigen Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch trotzdem beachtet werden. Behälter dicht geschlossen halten und vor Sonneneinstrahlung schützen. Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten. Produkt nicht versprühen. Nutzen Sie ggf. einen Schäumeraufsatz.

Lieferformen

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20512352	RHEOSEPT-WD plus Flasche 1000 ml	Flasche
20512001	RHEOSEPT-WD plus Wischdesinfektion Nachfüllset, Karton mit 4 Flaschen, Kanisterhahn und einem Schaumaufsatz	Karton
20512050	RHEOSEPT-WD plus Kanister 5 Liter	Kanister
20512100	RHEOSEPT-WD plus Kanister 10 Liter	Kanister
20512002	RHEOFIX-wischBox WD-gelb	Box
71004002	RHEOFIX-wischBox Nachfülltücher trocken	Karton 6 Rollen

Zubehör

Artikelnummer	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 10 Liter Kanister	einzel
48006009	Schäumer Maxi lose Stück	einzel

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Zulassung

Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.