


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

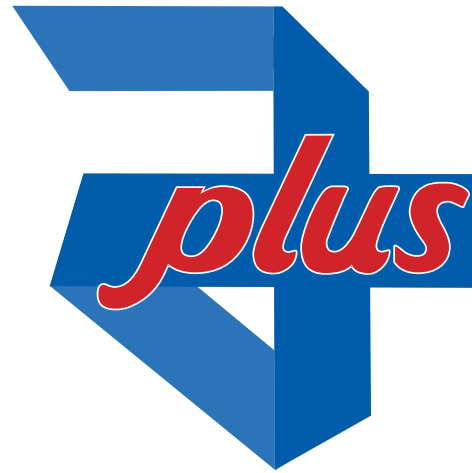

MyClean® DS A

Schnelldesinfektion



- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc)
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Ausführungen: **MyClean DS A Schnelldesinfektion**

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	1L	79615	4046153116201	10308644	12
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	5L	79649	4046153118540	10843828	2
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	10L	79616	4046153117017	10308650	1

Einwirkzeiten:


Noro - Viren (geringe Belastung)	konz. - 1 Min.
TBC (M. terrae)	konz. - 1 Min.
BVDV / (HCV)- Inaktivierung	konz. - 30 Sek.
Vaccinia	konz. - 30 Sek.
Bakterizid, levurozid	konz. - 1 Min.

Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 8,0g 1-Propanol, 42g Ethanol


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / VAH / HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit: ⏳ 3 Jahre

Symbole:

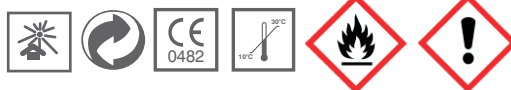

Gefahr Achtung

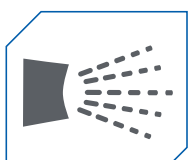

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-A-Schnelldesinfektion-20140902