

Produktinformation: 20524

Schnelldesinfektion

- anwendungsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion
- extrem schnelle bakterizide und viruzide Wirksamkeit auch bei TBC
- aldehydfrei, ohne Deckparfum
- schnelle rückstandsfreie Trocknung
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- VAH- gelistet



CE
0481

RHEOSEPT-SD plus

Alkoholische Schnelldesinfektion

Produktbeschreibung

Aldehydfreie Schnelldesinfektion mit angenehmen Geruchseigenschaften zur Durchführung schneller und umfassender Desinfektionsmaßnahmen. Das Produkt trocknet annähernd ohne Rückstände auf. Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. TBC, fungizid, viruzid (behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Grippe, sowie zusätzlich Noro). Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0481).

Anwendungsbereiche

Zur Schnelldesinfektion von allen wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten (nicht Acryl oder Plexiglas). Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und

Nässe befreien. Die flüssige gebrauchsfertige Lösung auf ein Tuch geben und die trockene Oberfläche gleichmäßig benetzen. Die Oberfläche sollte ausreichend benetzt sein. Ein direktes Sprühverfahren nur dann benutzen, wenn es unumgänglich ist. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen (Produktinformation). Nicht auf Acryl (Plexiglas) verwenden. Eiweiße können die Desinfektionswirkung herabsetzen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid inkl. TBC, fungizid, viruzid (HIV/ HBV/ HCV/ Noro/ Vaccinia/ BVDV).

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid EN 1276, EN 13697, EN 1650
Einwirkzeit 5 Minuten	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid (VAH) niedrige Belastung/Mechanik
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe) EN 14476
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Norovirus (MNV) EN 14476
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Mykobakterien (TBC)

Zusammensetzung

100g enthalten: 37g Ethanol, 13g Propan-2-ol, 0,08g Alkylbiguanid.

Physikalisch-chemische Daten

- Flash point >21°C

Kennzeichnung gem. GHS

- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- EUH208 - Enthält polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Hinweise

Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten. Nur für professionelle Anwender (für den gewerblichen Einsatz

durch geschultes und eingewiesenes Personal). Ein Nachspülen mit Wasser ist in der Regel nicht notwendig. Produkt trocknet annähernd rückstandsfrei auf. Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen, um mögliche Produktreste zu entfernen. Stets verschlossen, trocken, kühl (Raumtemperatur) und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20524310	RHEOSEPT-SD plus Sprayflasche 200 ml	Karton
20524340	RHEOSEPT-SD plus Flasche 500 ml	Karton
20524352	RHEOSEPT-SD plus Flasche 1000 ml mit Sprayer	Karton
20524050	RHEOSEPT-SD plus Kanister 5 Liter	Kanister
20524100	RHEOSEPT-SD plus Kanister 10 Liter	Kanister

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 51	Stück
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48006001	Sprayflasche Maxi 1000 ml mit Sprayer leer	Stück
48006003	Sprayer Maxi lose	Stück
48029002	Flaschenhalter für 4 Flaschen à 1000 ml	Stück
48029006	Flaschenhalter für 6 Flaschen à 1000 ml Edelstahl	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

RHEOSEPT®

Zulassung

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

RHEOSOL®

Wachendorff-Chemie GmbH • Langbaughstr. 15 • DE 53842 Troisdorf
☎ +49 2241 3923-0 📠 +49 2241 3923-90 ✉ info@rheosol.de 🌐 <http://www.rheosol.com>