


# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

# MyClean® Wipes

soft XXL

Trockene Vliestuchrolle

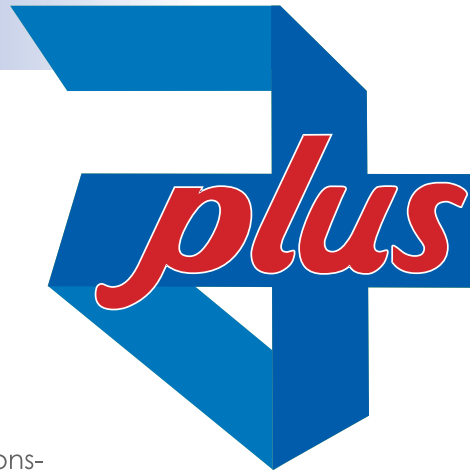

- Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem
- Größe : 29cm x 29 cm

### Anwendung:

MyClean® Wipes soft XXL trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5 bis 2 Litern der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. MyClean® Wipes soft XXL trockene Vliestuchrollen sind sowohl für die Anwendung in Kombination mit Flächen-, als auch mit Schnelldesinfektionsmitteln geeignet, insbesondere für : MyClean® DS, MyClean® DS OA, MyClean® FD-Gebrauchslösung (alle 4-Felder-Test), MyClean® DS A.

### Ausführungen:

#### MyClean® Wipes soft XXL

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Vliestuchrolle, trocken / Nonwoven cloth roll, dry	29 x 29cm	90 Blatt / 90 Sheet	179646	4046153117031	10388086	8
Vliestuchrolle, trocken / Nonwoven cloth roll, dry	29 x 29cm	70 Blatt / 70 Sheet	79648	4046153118564	10843834	8

### Hinweise:

Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage).

Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, gebrauchsfertigen Lösung.

### Verwendbarkeit:

 3 Jahre

### Symbole:



 MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MyClean-Wipes soft XXL-20140901